

OSTRZEŻENIE

- ⚠ Przed użyciem termometru dokładnie zapoznaj się z jego instrukcją obsługi.
- ⚠ Ryzyko zadławienia: połknięcie przykrywkę i baterii stanowi duże niebezpieczeństwo. Dzieci mogą używać termometru wyłącznie w obecności osób dorosłych.
- ⚠ Nie używaj termometru do pomiaru temperatury w uchu.
- ⚠ Niniejszy termometr przeznaczony jest wyłącznie do pomiarów temperatury ciała w ustach, pod pachą lub w odbycie.
- ⚠ Nie trzymaj termometru w wysokich temperaturach, ponieważ może wybuchnąć.
- ⚠ Uwaga: użycie kapturka na czujnik może spowodować, że wynik temperatury będzie różnił się o ok. 0.1°C od rzeczywistej temperatury ciała.
- ⚠ Zaleca się przeprowadzenie kontroli działania termometru co dwa lata.
- ⚠ Jeśli termometr nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie.


PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM TERMOMETRU

Niniejszy termometr elektroniczny gwarantuje szybki i dokładny pomiar temperatury ciała. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby poznać wszystkie funkcje termometru oraz zapewnić dokładne wyniki pomiaru przez długi czas. Niniejszy termometr wyprodukowany jest zgodnie z systemem EN12470-3:2000+A1:2009, ASTM E1112-00. Producent posiada certyfikaty ISO 9001:2008 oraz ISO 13485:2003+AC:2007.

ZAWARTOŚĆ

Termometr, instrukcja obsługi, etui

NOVAMA N E O

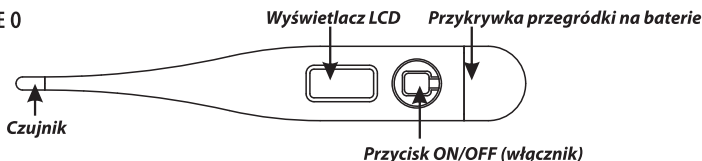

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



- ! Nie zginaj, ani nie rzucaj termometrem. Termometr nie jest odporny na wstrząsy.
 - ! Nie gotuj czujnika w celu dezynfekcji.
 - ! Nie wystawiaj termometru na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur.
 - ! Nie rozkręcaj termometru. Aby wymienić baterie, przeczytaj punkt „Wymiana baterii”.
 - ! Nie zostawiaj termometru w pobliżu mikrofalówek lub telefonów komórkowych, aby nie powodować zakłóceń elektromagnetycznych.
- — Prąd stały.
 ⚡ Urządzenie typu B.
 ⚠ Uwaga! Zapoznaj się z instrukcją.
- LOT Numer seryjny
 🏭 Fabryka
 🇪🇺 European Authorized Representative

DANE TECHNICZNE

Zakres: 32°C – 42,9°C (90°F – 109,9°F)

(jednostka pomiaru °C/°F ustawiona fabrycznie)

Dokładność: ±0.1°C (w zakresie 35,5°C – 42°C)

±0.2°C (zakres poniżej 35,5°C lub powyżej 42,0°C)

W temperaturze pokojowej 18°C – 28°C

Wyświetlacz: Ciekłokrystaliczny

Pamięć: Przechowywanie ostatniego wyniku pomiaru

Bateria: 1 x 1.5 VDC (LR41 lub SR41, UCC 392)

Żywotność baterii: ok. 200 godzin

Wymiary: 12,4 x 1,8 x 0,9 cm

Waga: ok. 10 gramów (z baterią)

Warunki użytkowania: Temperatura: 5°C – 40°C

Wilgotność względna: <85% RH

Warunki przechowywania i transportu:

Temperatura: MIN -10°C MAX 55°C

Wilgotność względna: <95% RH

Wodoodporność: nie

Klasyfikacja: Urządzenie typu B

OBŚŁUGA

1. Naciśnij przycisk ON/OFF znajdujący się obok wyświetlacza LCD. Kiedy na ekranie pojawi się 00.0, usłyszysz sygnał dźwiękowy, a następnie wyświetli się ostatni zapisany wynik pomiaru. Po przeprowadzeniu autotestu, termometr przejdzie w tryb pomiaru.

Uwaga: Jeśli wynik pomiaru jest niższy niż 32°C lub 90°F, na wyświetlaczu pojawi się symbol „Lo”; jeśli wynik pomiaru jest wyższy niż 42,9°C, na wyświetlaczu pojawi się symbol „Hi”.


2. Umieść termometr w wybranym miejscu pomiaru (usta, odbyt lub pod pachą):


a) pomiar w ustach: umieść termometr pod językiem, w miejscu gdzie na rysunku 2 znajdują się symbole "V". Zamknij usta i oddychaj równomiernie przez nos, aby wdychane i wydychane powietrze nie wpływało na wynik pomiaru. Zakres prawidłowych temperatur wynosi 35,7°C – 37,3°C.

b) pomiar w odbycie: nasmaruj wazeliną srebrną końcówkę czujnika dla łatwiejszego pomiaru. Delikatnie wsuń czujnik w odbyt na głębokość ok. 1 cm. Zakres prawidłowych temperatur wynosi 36,2°C – 37,7°C.


3. W trakcie przeprowadzania pomiaru miga symbol jednostki pomiarowej. Gdy symbol przestanie migać, włączy się alarm dźwiękowy na ok. 10 sekund. Jednocześnie na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru. Bez wyjątków należy utrzymać minimalny czas pomiaru do chwili usłyszenia sygnału. Pomiar trwa także po sygnale, jeśli termometr nadal znajduje się w miejscu pomiaru. Po wyjściu termometru z miejsca pomiarowego wyświetlany wynik nie zmienia się.
Uwaga: Sygnał dźwiękowy zazwyczaj brzmi: „Bi – Bi – Bi – Bi – ...”. Gdy wynik pomiaru przekroczy 37,8°C, sygnał będzie szybszy „Bi-Bi-Bi – – – – Bi-Bi-Bi – – – – Bi-Bi-Bi”.
4. Aby przedłużyć żywotność baterii, po zakończeniu pomiaru wyłącz termometr, naciskając przycisk ON/OFF. Termometr wyłączy się automatycznie po ok. 10 minutach, jeżeli nie będzie przez ten czas używany lub gdy nie zostanie wyłączony ręcznie.
5. Przechowuj termometr w etui ochronnym.

PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM TERMOMETRU


1. Wymień baterię, gdy w lewym dolnym rogu pojawi się symbol baterii .
2. Przesuń przykrywkę przegrodki na baterie, jak pokazano na rys. 3.
3. Delikatnie wyciągnij plastikową płytkę drukowaną z gniazdem baterii z obudowy termometru na ok. 1 cm (1/2") (rys. 4).
4. Użyj przedmiotu zakończonych czubkiem, jak długopis, aby wyjąć zużyta baterię. Zutilizuj baterię zgodnie z przepisami (Utylizacja niepotrzebnego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej). Wymień baterię na nową 1.5 DC LR41 lub SR41, UCC392, lub ich odpowiednik. Sprawdź, czy bateria włożona jest zgodnie z polaryzacją (rys. 5).

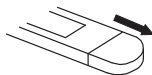

Rysunek 3

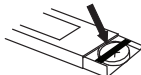

Rysunek 4

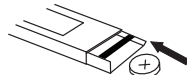

Rysunek 5

UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ



Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usowanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnia, że recykling odbywa się w/g zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych.

GWARANCJA

- Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu w przypadku uszkodzeń materiału lub produkcji.
- W ramach gwarancji uszkodzone elementy zostaną za darmo wymienione na nowe lub naprawione.
- Gwarancja nie obejmuje dostarczanych wraz z urządzeniem akcesoriów oraz części podlegających naturalnemu zużyciu.
- Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Urządzenie należy przesać do serwisu w celu naprawy w ciągu 8 dni od stwierdzenia usterki.
- Koszty transportu pokrywa użytkownik.
- Naprawy nie objęte warunkami gwarancji pokrywa użytkownik.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeń powstałych nie z winy producenta (upadek, nieprawidłowy transport).
- Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody, pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniem, gdy urządzenie nie działało.
- Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego rachunkiem bądź fakturą, które należy dołączyć do karty gwarancyjnej.
- Brak poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej uprawomocnionej rachunkiem jest jednoznaczne z utratą gwarancji.

Jeśli urządzenie w dalszym ciągu nie działa poprawnie, prosimy o kontakt z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA NOVAMA w Polsce.

INFOLINIA: 0 801 011 707 lub + 48 42 714 36 00
SERVIS NOVAMA: ul. Traktorowa 196, 91-218 Łódź

KARTA GWARANCYJNA

Model: NOVAMA NEO

DANE KUPUJĄCEGO

Data zakupu:


Imię i Nazwisko:

Adres:

Numer telefonu:

Podpis i pieczętka sprzedawcy

Podpis potwierdzający akceptację warunków gwarancji:

Distributed by / Dystrybutor:  **novamed®**

Novamed Sp. z o.o. ul. Traktorowa 143 91-203 Łódź POLAND Hotline: 801 011 707

novamed.pl



Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co., Ltd.
 Building 2, No.202,Zhenzhong Road, West Lake Economy & Technology Zone 310030 Hangzhou China
 Made in China / Wyprodukowano w Chinach



0197

Produkt zgodny z wymogami MDD 93/42/EEC



Shanghai International Trading Corp. GmbH (Hamburg)
 Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany